

test.zmdx.at

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

ANLEITUNG

 ZENTRUM FÜR
MOLEKULARE
DIAGNOSTIK



Ablauf der Testungen



test.zmdx.at



1



ONLINE REGISTRIEREN

Registrierung auf test.zmdx.at.
Persönliche Daten vervollständigen.



2



PCR TEST GRATIS ABHOLEN

In der WebApp „Gurgeltest abholen“
wählen. Gurgeltest in einer der
definierten Filialen abholen.



PCR Test mit nach
Hause nehmen.

3



GURGELN NACH ANLEITUNG

Test unter Videoaufzeichnung
durchführen.

4




PROBE VERPACKEN

Proberöhrchen in den Retour-
beutel geben. Diesen zurück in
die Verpackungsschachtel legen.



5

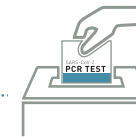

PROBE ABGEBEN

Abgabe in einer
der definierten Filialen



6



ERGEBNIS ABRUFEN

Ergebnisauswertung innerhalb
von 24h ab Probenabholung.
Ergebnis per SMS erhalten.

SARS-CoV-2 PCR TEST

MIT MUND- RACHENSPÜLLÖSUNG
ZUR EIGENANWENDUNG

PCR Test Kit

- 1 Kochsalzlösung
- 2 Transferröhrchen
- 3 Probenröhrchen
- 4 Schutzbeutel
- 5 Zellstoff
- 6 PCR Test Verpackung
- 7 Gebrauchsanweisung



WebApp Portal



Registrierungsportal:
QR-Code scannen oder
zum Link: test.zmdx.at



10:52 test.zmdx.at 95%

ZENTRUM FÜR MOLEKULARE DIAGNOSTIK
COVID-PORTAL

E-Mail-Adresse:


Passwort:

[Passwort vergessen?](#)

Anmelden

Noch nicht registriert?
Jetzt Registrieren

REGISTRIEREN Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und einem Passwort. Achten Sie unbedingt darauf, dass Ihr Postfach nicht voll ist und Sie Ihre E-Mailadresse richtig schreiben.

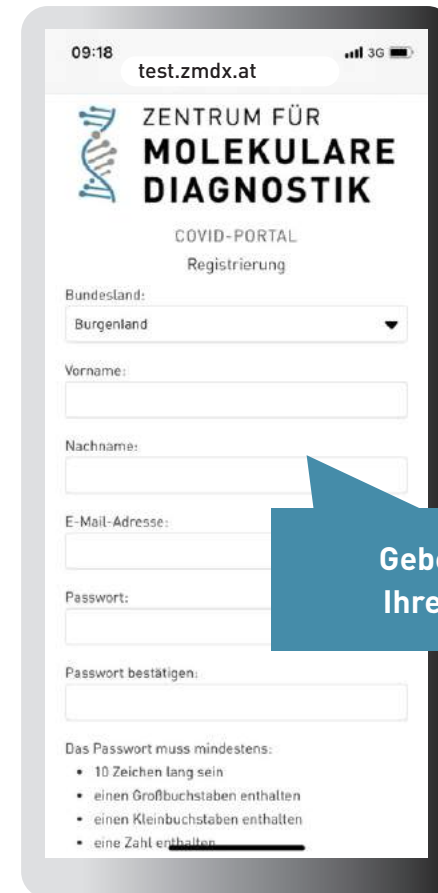

09:18 test.zmdx.at 3G

ZENTRUM FÜR MOLEKULARE DIAGNOSTIK
COVID-PORTAL
Registrierung

Bundesland:
Burgenland

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:


Passwort:

Passwort bestätigen:


Das Passwort muss mindestens:

- 10 Zeichen lang sein
- einen Großbuchstaben enthalten
- einen Kleinbuchstaben enthalten
- eine Zahl enthalten


Geben Sie hier Ihre Daten an.

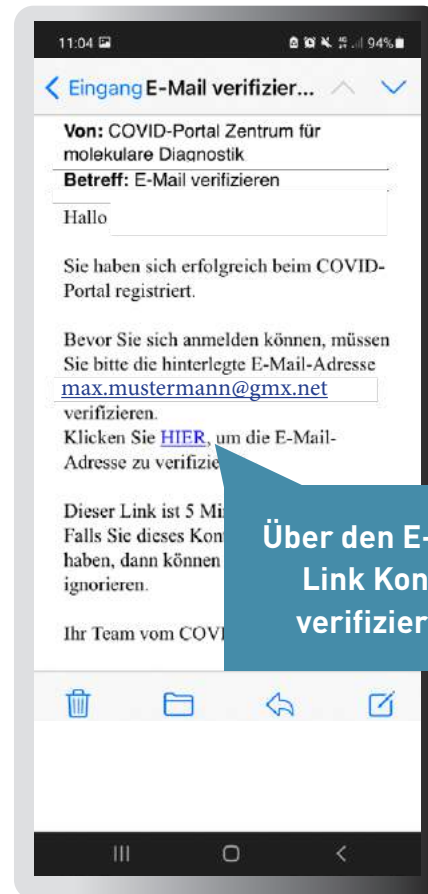


Über den E-Mail Link Konto verifizieren

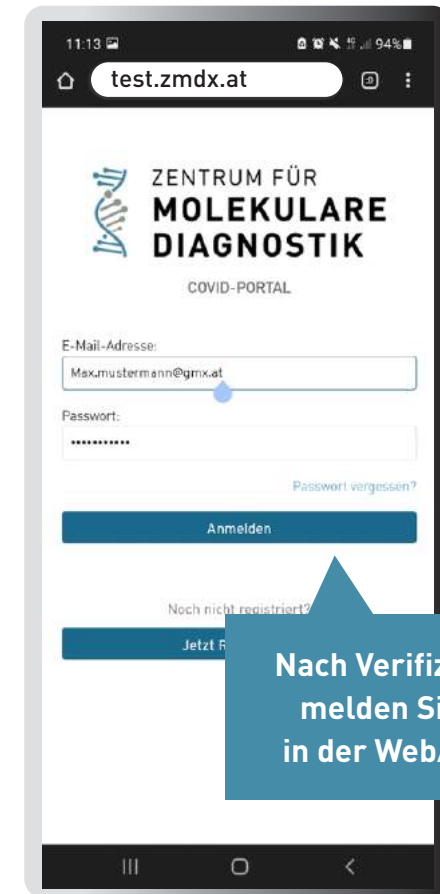

Nach Verifizierung, melden Sie sich in der WebApp an.


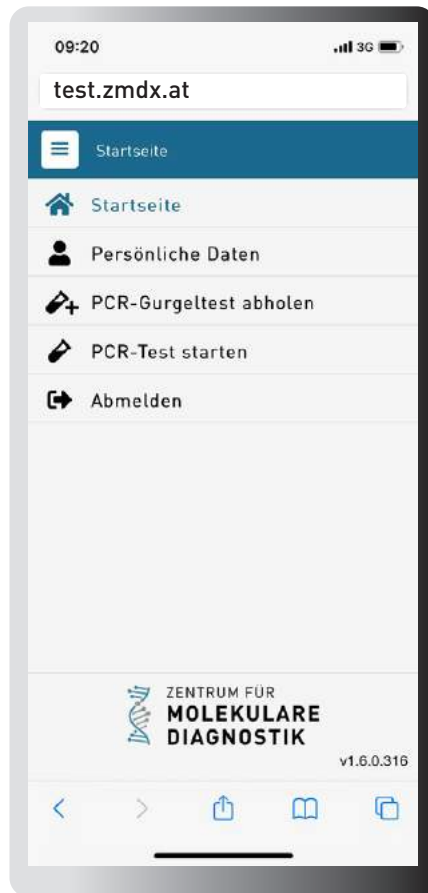


Vervollständigen Sie Ihre Daten.

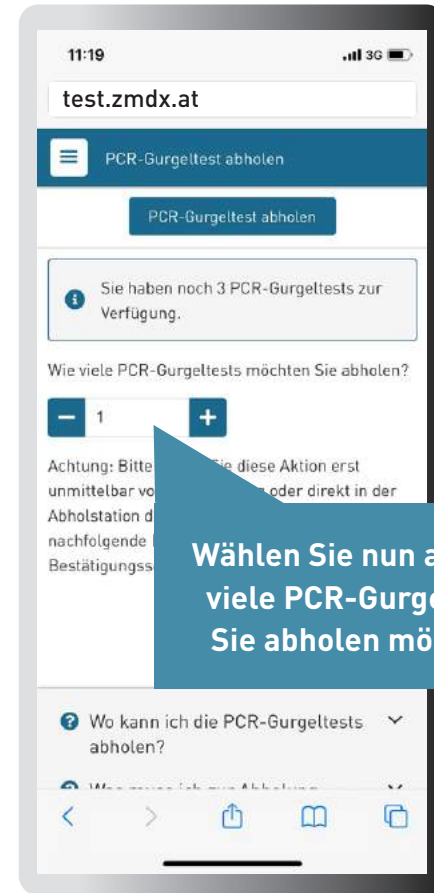


Wählen Sie nun aus, wie viele PCR-Gurgeltests Sie abholen möchten.


Wenn Sie weitere Personen hinzufügen möchten, können diese unter „Neue Person hinzufügen“ ergänzt werden.

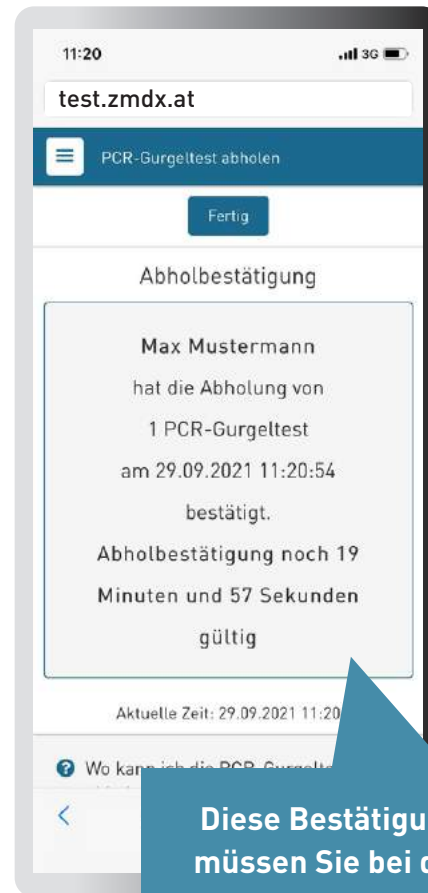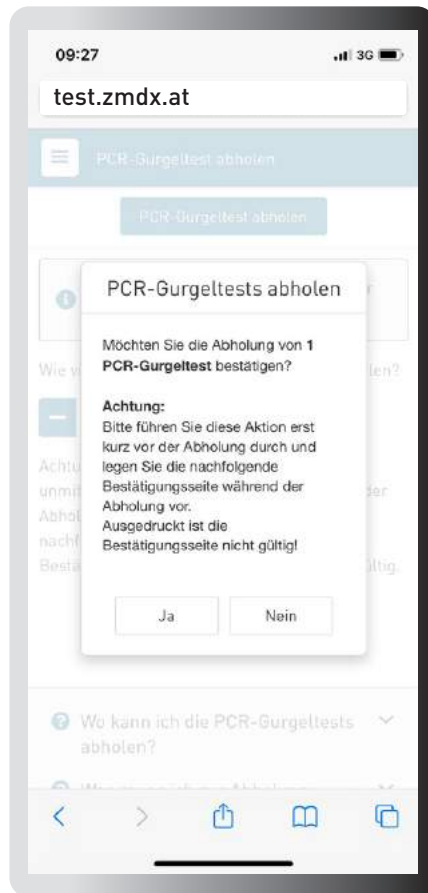

Diese Bestätigung müssen Sie bei der Abholung vorweisen.

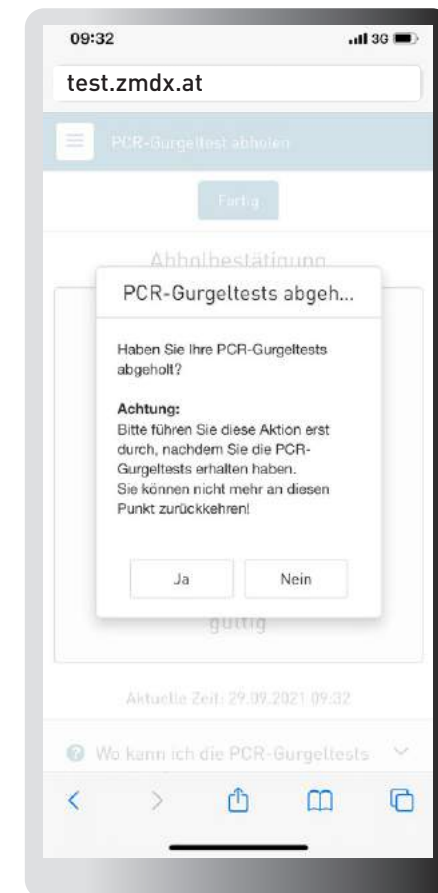

Gehen Sie nun auf PCR-Test starten.



Probe aktivieren

Geben Sie die Probennummer vollständig ein. Bei Durchführung mittels Mobiltelefon oder Endgerät mit Kamera, können Sie die Probennummer auch abschnappen. Hierzu klicken Sie bitte auf die blaue Schaltfläche „Scannen“. Die Probennummer finden Sie auf dem Probenröhrchen, welches im Testkit enthalten ist.

Nach Eingabe der Probennummer können Sie die Daten der zu testenden Person eingeben. Führen Sie dann den Test durch. Bei mehreren Personen, bitte diesen Schritt erneut starten und nacheinander registrieren.

Probennummer: *

GA000950015

Wo kann ich die PCR-Gurgeltests abholen?

Aktivieren Sie hier die Probennummer des vorliegenden Gurgeltestkits.

09:36

test.zmdx.at

PCR-Test starten

Weiter >

Jetzt wird gegurgelt

Bitte gehen Sie auf PCR-Gurgeltest starten um den Test vor der Kamera zu beginnen.

Der Test wird wie folgt ablaufen:

- 1 Öffnen Sie die Kochsalzlösung, nehmen Sie diese vor der Kamera in den Mund und spülen/gurgeln Sie damit mindestens 1 Minute gründlich.
- 2 Nehmen Sie das Transferröhrchen und spucken Sie damit die gespülte Kochsalzlösung in das geöffnete Probenröhrchen.
- 3 Anschließend verschließen Sie das Probenröhrchen mit der Kappe.

PCR-Gurgeltest starten

Gehen Sie nun auf PCR-Gurgeltest starten.

11:20

test.zmdx.at

PCR-Test starten

Fertig

Verpacken


Probe verpacken

Fast geschafft!


- Geben Sie das verschlossene Probenröhrchen in den Schutzbeutel.
- Achten Sie darauf, dass sich der Zellstoff im Schutzbeutel befindet.
- Verschließen Sie nun den Schutzbeutel gut und geben Sie den verschlossenen Schutzbeutel zurück in die PCR-Test Verpackung.
- Das Testergebnis wird Ihnen bei Probenabgabe bis 10.00 Uhr am selben Tag zugesendet. Bei Probenabgabe nach 10.00 Uhr erhalten Sie das Testergebnis innerhalb von 24 Stunden.

Um den Test final abzuschließen, unbedingt „FERTIG“ anklicken.

Anleitung Testung

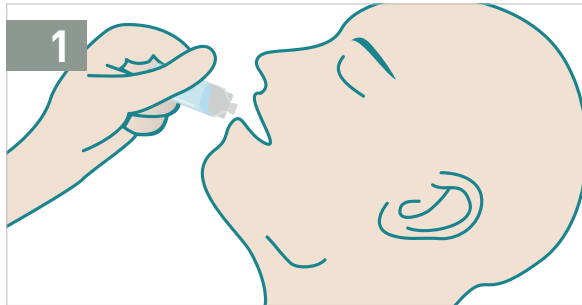

1. Öffnen Sie die Kochsalzlösung nehmen Sie diese in den Mund und spülen/gurgeln Sie damit mindestens 1 Minute gründlich.

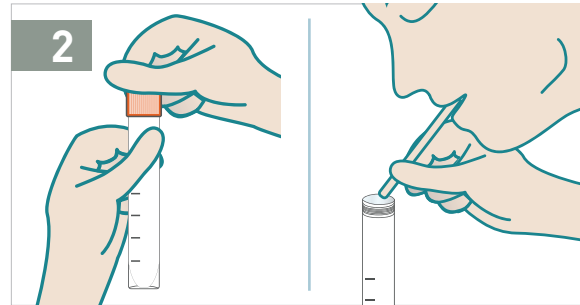

2. Öffnen Sie das Proberöhrchen. Nehmen Sie das Transferröhrchen und spucken Sie damit die gespülte Kochsalzlösung in das Probenröhrchen.



3. Verschließen Sie das Probenröhrchen samt Probe mit der Kappe.



4. Geben Sie das Probenröhrchen mit dem Zellstoff in den Schutzbeutel. Verschließen Sie nun den Schutzbeutel gut und geben Sie ihn zurück in die PCR Test Verpackung.



5. Verwahren Sie die Gebrauchsanleitung mit Ihrer Probennummer sicher auf und geben Sie diese keinesfalls in die PCR Test Verpackung.



6. Bringen Sie die PCR Test Verpackung umgehend nach Probenentnahme zu einer möglichen Abgabestelle. Siehe WebApp.